

הוראות שימוש לסקשן

- א.** הדקו היטב את המכסה (1) למכל (2).
- ב.** חברו את צינור הפילטר (3) לפייה שבמכשיר, ובצידו השני לחלקו העליון של המכל (4).
- ג.** חברו את צינור השאיבה (5) אל הפייה שבצידו העליון של המכל (6).
- ד.** הכניסו מי סבון/ציטרין לפי הדרכת הצוות הרפואי – דרך הפייה שבחלקו העליון של המכל (7) וסגרו היטב.
- ה.** חברו את צינורית הקטטר (8) * לצינור השאיבה (5).
- ו.** בדגמים שבהם הפינגר טיפ [המחבר] (9) אינו מובנה, יש לחברו.
- ז.** על מנת למקסם את עוצמת השאיבה יש להדק את האצבע לפינגר טיפ [מחבר] בחלקו העליון (10) או לסגור אותו בסוגר [בדגמים שקיים].
- ח.** הניחו את המכל במקום המיועד לכך במכשיר.
- ט.** חברו את המכשיר לשקע החשמל.**
- י.** לחצו על מתג ההפעלה.
- יא.** כווננו את עוצמת השאיבה לפי הדרכת הצוות הרפואי.

* לפי הקוטר המתאים למטופל [מסופק ע"י קופ"ח]
 ** בחלק מהדגמים יש בטרייה פנימית



