

# הוראות שימוש

## לכרית רוהו

1. מניחים את הכרית על הכיסא כאשר לחצני Easy Flow (אדום וירוק) מונחים בכיוון החלק הקדמי של הכיסא.
2. לוחצים על המתג הירוק של הלחצן Easy Flow.
3. מסובבים נגד כיוון השעון את פיית הוונטיל שבפינת הכרית.
4. מלבישים את פיית המשאבה על פיית הוונטיל.
5. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל עם פיית המשאבה ומתחילים לנפח עד שהכרית מתעגלת.
6. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל ומושכים החוצה את פיית המשאבה.
7. בשלב זה האוויר יוצא – יש להמתין 3 דקות לפחות, עד שהלחץ בתוך הכרית שווה ללחץ האטמוספרי.
8. מתיישבים על הכרית בישיבה מלאה עד סוף המושב (אין להישען לצדדים).
9. ממתנים כ-15 שניות להתאמת כמות האוויר למשתמש.
10. מסובבים את הוונטיל בכיוון השעון לסגירה.
11. בשלב זה כמות האוויר מותאמת למשתמש.
12. על מנת שהמשתמש לא יחליק קדימה יש להרים את רגליו ולהמתין כ-10 שניות, כדי שהכרית תהיה גבוהה יותר בחלקים הקדמיים. כנ"ל במקרה של התאמה לצדדים.
13. לחיצה על המתג האדום של הלחצן Easy Flow נועלת את האוויר בארבעה אזורי הכרית.
14. בשלב זה אפשר להוריד חזרה את רגלי המשתמש.

