

אלקטרודות לטנס משכך כאבים

מק"ט 2443

פריט
מכירה

אופן השימוש:

1. חבר/י את החוטים לאלקטרודה כאשר הכיסוי המגן עדין דבוק לאלקטרודה.
2. הורד/י את כיסוי המגן על ידי הסרת כיסוי מקצה אחד, ומשיכתו בצורה אחידה על פני האלקטרודות (יש לשמור את כיסוי המגן על מנת לאפשר שימוש חוזר).
3. הדבק/י את האלקטרודה על עור נקי, ללא כצעים או חתכים. (מיקום ההנחה יקבע על ידי רופא או פיזיותרפיסט בלבד) על ידי לחיצה במרכז האלקטרודה על העור, ואחר כך לשטח/ למרוח את הקצוות כלפי חוץ.

אופן הורדת האלקטרודות בתום הטיפול:

1. יש לסגור את מכשיר הטנס ולנתק את החוטים מהמכשיר.
2. הורד/י את האלקטרודות על ידי משיכה מקצה אחד של האלקטרודה.

שמירה על האלקטרודות לשימוש חוזר:

1. החזיר/י את כיסוי המגן על האלקטרודות למקומו, והכניס/י את האלקטרודות לשקית ניילון. את השקית מומלץ לסגור עם סוגר פלסטיק.
2. אורך חיי האלקטרודה משתנה על פי תנאי השימוש, הכוללים את האקלים, מצב העור וניקיונו, ומשך השימוש.
3. במידה והג'ל על האלקטרודה התייבש, ניתן להניח טיפת מים, למרוח אותה על האלקטרודה בעזרת האצבע, ולהניח למספר דקות, עד שהדביקות חוזרת.

חשוב: במידה ומתפתח גירוי או אודם בעור, יש להתייעץ עם רופא.

