

הוראות שימוש לכרית רוהו

1. מניחים את הכרית על הכיסא כאשר לחצני Easy Flow (אדום וירוק) פונים לרגלי המשתמש.
2. לוחצים על המתג הירוק של הלחצן Easy Flow.
3. מסובבים נגד כיוון השעון את פיית הוונטיל שבפינת הכרית.
4. מלבישים את פיית המשאבה על פיית הוונטיל.
5. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל עם פיית המשאבה ומתחילים לנפח עד שהכרית מתעגלת.
6. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל ומושכים החוצה את פיית המשאבה.
7. בשלב זה האוויר יוצא – יש להמתין 3 דקות לכחות, עד שהלחץ בתוך הכרית שווה ללחץ האטמוספרי.
8. מתיישרים על הכרית בישיבה מלאה עד סוף המושב (אין להישען לצדדים).
9. ממתנים כ-15 שניות להתאמת כמות האוויר למשתמש.
10. מסובבים את הוונטיל בכיוון השעון לסגירה.
11. בשלב זה כמות האוויר בכרית נכונה ויש לחלק אותו לפי האזורים (יש 4 אזורים).
12. על מנת שהמשתמש לא יחליק קדימה יש להרים את רגליו ולהמתין כ-10 שניות, כדי שהכרית תהיה גבוהה יותר בחלקים הקדמיים. כנ"ל במקרה של התאמה לצדדים.
13. לחיצה על המתג האדום של הלחצן Easy Flow נועלת את האוויר ביחס הקיים.
14. בשלב זה אפשר להוריד חזרה את רגלי המשתמש.

