


הוראות שימוש

סופר טיפות 100HK – (לשקית עירווי)

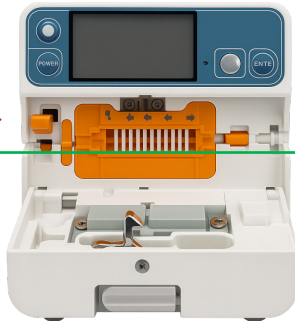

→ תפס הסט
שקית האינפוזיה → מטופל

1. הרכיבו את המשאבה על עמוד ייעודי בצורה מאוזנת.
2. חברו את המשאבה לשקע חשמל תקני.
3. לחצו על POWER להדלקה.
4. הרכיבו את סט האינפוזיה במגירת המשאבה בתהליך זה:
- א. לחצו על לחצן פתיחת המגירה.
- ב. הרימו את תפס הסט והרכיבו את סט האינפוזיה בכיוון החץ (מעל החץ הירוק).

- ג. ברגע שהסט יורכב כמתואר תידלק הנורה בצבע ירוק. הורידו את התפס וסגרו את מגירת השאיבה.
- ד. לחצו על לחצן BOLUS להזרמת הנוזל בסט. יש להזרים את הנוזל מהשקית עד יציאת נוזל בקצה השני.
- ה. הרכיבו את הסט למטופל.
- ו. הגדירו קצב / מספר טיפות / זמן טיפול.
- ז. לשינוי מצב בין RATE / DRIP / TIME לחצו על הלחצן SWITCH (לחצן שלישי מלמעלה בצד שמאל, לחצנים אפורים)

לחצן RATE
לחצן VTBI



- RATE MODE - קצב לפי נפח לשעה
- DRIP MODE - קצב לפי טיפות לדקה
- TIME MODE - נפח כולל בזמן מוגדר מראש
- volume to be infused - VTBI - נפח כולל לטיפול

6. בעמוד הבא מוצגת דוגמה למצב RATE MODE - קצב לפי נפח לשעה. **שימו לב** כי הדוגמה תקפה לכל תוכניות הטיפול:
- בטיפול DRIP MODE: המושגים יוחלפו RATE = DRIP
- בטיפול TIME MOD: המושגים יוחלפו RATE = VTBI, TIME = VTBI

א. לחצו על RATE (לחצן ראשון מלמעלה בצד שמאל, לחצנים אפורים).



לחצן START
לחצן RATE

ב. הכניסו את הקצב המבוקש ולחצו על ENTER.

- אם אינכם מעוניינים להגביל בנפח כולל את מתן הטיפול לחצו על START.
- אם יש צורך בהגבלת הנפח הכולל לחצו על הלחצן VTBI (לחצן שני מלמעלה בצד שמאל, לחצנים אפורים), הגדירו כמות ולחצו על ENTER. לאחר מכן לחצו על START ומתן הטיפול יתחיל.

7. במתן טיפול אפשר לראות את קצב הזרימה, את החומר שנותר לטיפול, את הכמות שהוזרמה BOLUS, את הזמן שנותר לטיפול ואת כמות החומר שהוזרם.



8. בסיום הטיפול המשאבה תתריע בצליל ובהדלקת נורת ההתראה על סיום הטיפול ויופיע על גבי המסך FINISHED. במצב זה המשאבה תיכנס אוטומטית למצב KVO (זרימה במינונים נמוכים מאוד במטרה לשמור על וריד פתוח).
- אם יש צורך להמשיך את הטיפול לחצו על START. אם הוחלט על סיום הטיפול לחצו על STOP.

