

# הוראות להרכבת ערכה למשאבת חלב מק"ט 2024




## שימו לב: אין לשטוף את הערכה במים רותחים!

### הערכה מכילה:

1. מעמד לבקבוק
2. בקבוק
3. מבנה פעמון
4. כיפת הפעמון
5. מכסה לכיפת הפעמון [כולל חור לחיבור הצינורית]
6. כרית סיליקון [כולל שסתום 'אל-חזור']
7. מכסה לכרית סיליקון
8. צינורית סיליקון
9. מחבר\* 2
10. מכסה לבקבוק

\* ניתן לרכוש בנפרד מתאם למשאבת חלב 'אמדה'

### הוראות הרכבה - כמתואר בתמונה:

- א.** הכניסו את כרית הסיליקון עם שסתום האל-חזור (6) למבנה הפעמון (3) והדקו את שסתום ה'אל חזור'.
- ב.** הכניסו את כיפת הפעמון (4) כלפי מטה אל מבנה הפעמון (3).
- ג.** הבריגו את מכסה כיפת הפעמון (5) אל מבנה הפעמון (3) באופן שלאחר ההברגה מקום חיבור הצינורית יהיה מרוחק ממבנה הפעמון, כמתואר בתמונה. 
- ד.** הבריגו את הבקבוק (2) למבנה הפעמון (3).
- ה.** חברו מחבר (9) לצינורית הסיליקון (8) בשני הצדדים.
- ו.** חברו את צינורית הסיליקון (8) לחור חיבור הצינורית שבמכסה כיפת הפעמון (5).
- ז.** חברו את צינורית הסיליקון (8) למשאבה.
- ח.** לשמירה על תקינות המשאבה, מומלץ לוודא כי בעת הפעלתה אין נוזלים או אדים בצינורית.
- ט.** בתום השאיבה ניתן לכסות את הבקבוק במכסה (10) ולהעמידו על המעמד (1).

