

הוראות שימוש למנוע ולמזרן נגד פצעי לחץ – חברת APEX

1. פרסו את המזרן על המיטה [ע"פ האיור שעל המזרן] כך שצינורות החיבור יהיו באזור הרגליים.
2. תלו את המנוע על דופן המיטה באופן בטוח למניעת נפילה.
3. חברו את הצינורות למנוע המזרן [ע"פ האיור שעל ה'מחבר'].
4. ודאו שרצועות החירום CPR אשר בצד המזרן סגורות.
5. חברו את המנוע לשקע החשמל.
6. לחצו על מתג ההפעלה הירוק. הנורה הירוקה תידלק.
7. המנוע נכנס למצב ניכוח שנמשך כחצי שעה עד שהמזרן מנופח.
8. כווננו את המנוע לכי משקלו של המטופל [טווח 40-170 ק"ג]

40	60	80	110	170	250	kg
85	130	175	240	375	550	lb

9. בחרו במנוע את המצב: דינמי/סטטי.
10. יש להשאיר את המנוע מחובר 24/7.
11. נורת מנעול נדלקת ואי אפשר לשנות מצב עד שחרור הנעילה.
12. לביטול הצפצוף בעת תקלה יש ללחוץ על
13. נורת הגדרות נדלקת כאשר יש תקלה בלחץ האוויר או החשמל.

חובה לפרוס מגן מזרן לשם שמירה על ההיגיינה!

