

הוראות שימוש

למשאבת חלב חשמלית 'שרהלה' דגם

המשאבה מאושרת לשימוש ע"י ה-FDA

1. חברו את צינורית הערכה לאחד מפתחי הצינורית במכשיר. חברו ערכה אחת לצד ימין (R) או לצד שמאל (L), או חברו שתי ערכות לשני הצדדים.
 2. הפעלה אוטומטית/ברירת מחדל – כאשר המשאבה מחוברת לחשמל, לחיצה על כפתור ההפעלה (האמצעי) תפעיל את המשאבה במצב עיסוי – stimulation (עידוד ייצור חלב), בעוצמה 1 בשני הצדדים בו-זמנית, למשך שתי דקות. לאחר מכן תעבור המשאבה למצב שאיבה – Expression, בעוצמה 3. קוצב הזמן (טיימר) מכוון ל-30 דקות, ולאחר מכן תכבה המשאבה באופן אוטומטי.
 3. כדי לשנות את עוצמת השאיבה יש לבחור צד שאיבה על ידי לחיצה על הכפתור התחתון (R, L או D לדו-צדדי). כדי לשנות מצב, לחצו על הכפתור העליון (שעליו מצוירות טיפות).
- הלחיצה תעביר את המשאבה ממצב עיסוי (stimulation) למצב שאיבה מלאה (expression), וכן להפך. כדי לכוון עוצמה, לחצו על מקשי כיוון העוצמה +/- . אפשר לקבוע את העוצמה הרצויה לכל צד בנפרד. כדי לעשות זאת, בחרו צד שאיבה וכוונו את עוצמת השאיבה. חזרו על הפעולה לצד השני. אפשר לשנות את העוצמה גם בזמן השאיבה.

בזמן השאיבה:

- המשאבה תפעל שלושים דקות ברצף, ותכבה אוטומטית לאחר מכן.
- תוכנית שבת: לפני שבת יש לחבר שעון שבת, לכוון את המשאבה על מצב on ולהדליק אותה כדי שתתחיל לפעול. את שעון השבת יש לכוון להפעלה בפרקי זמן שאינם עולים על 30 דקות (כדי למנוע את כיבוי המשאבה שלא ע"י השעון). כיוון השעון ליותר מ-30 דקות יגרום לכיבוי מנגנון המשאבה, כך שלאחר מכן היא לא תידלק שוב במשך השבת.

חשוב לדעת:

- במקרה של עוצמת שאיבה נמוכה מדי, בדקו את נקודות החיבור בין המשאבה לערכה וודאו שהכול מחובר ומהודק היטב, וכן שאין לחות בין חלק 4 לחלק 5 בערכה.
- השימוש במשאבת החלב 'שרהלה' מחייב שימוש בערכה הייעודית של 'עזר מציון' בלבד.
- השתמשו במשאבת החלב רק לצורך ביתי ובשימוש סביר והוגן.
- במקרה של תקלה פנו לסניף.
- אין לבצע במשאבה שום שינוי או תיקון.
- נקו את המשאבה במטלית יבשה בלבד.

