


הוראות להרכבת ערכה למשאבת חלב מק"ט 2024

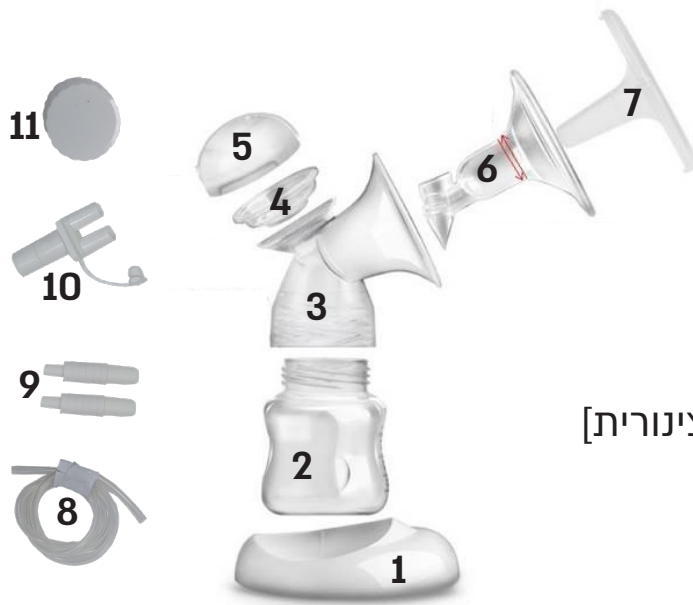

שימו לב: אין לשטוף את הערכה במים רותחים!

הערכה מכילה:

1. מעמד לבקבוק
2. בקבוק
3. מבנה הפעמון
4. כיפת הפעמון
5. מכסה לכיפת הפעמון [עם חור לחיבור הצינורית]
6. כרית סיליקון [עם שסתום 'אל-חזור']
7. מכסה לכרית סיליקון
8. צינורית סיליקון
9. מחבר A *2
10. מחבר B
11. מכסה לבקבוק

הוראות הרכבה - כמתואר בתמונה:

א. הכניסו את כרית הסיליקון עם שסתום האל-חזור (6) למבנה הפעמון (3) והדקו את שסתום ה'אל חזור'.

ב. הכניסו את כיפת הפעמון (4) כלפי מטה אל מבנה הפעמון (3).

ג. הבריגו את מכסה כיפת הפעמון (5) אל מבנה הפעמון (3) באופן שלאחר ההברגה מקום חיבור הצינורית יהיה מרוחק ממבנה הפעמון, כמתואר בתמונה.



ד. הבריגו את הבקבוק (2) למבנה הפעמון (3).

ה. חברו מחבר A (9) לצינורית הסיליקון (8) בצד אחד בלבד.

ו. חברו את צינורית הסיליקון (8) לחור חיבור הצינורית שבמכסה כיפת הפעמון (5).

ז. חברו את צינורית הסיליקון (8) למשאבה.

במשאבת חלב מדגם 'שרהלה' יש לחבר את מחבר A (9) גם בצד השני טרם חיבור הצינורית למשאבה.

במשאבת חלב מחברת 'אמדה' יש לחבר את מחבר B (10) בצד השני טרם חיבור הצינורית למשאבה.

ח. לשמירה על תקינות המשאבה, מומלץ לוודא כי בעת הפעלתה אין נוזלים או אדים בצינורית.

ט. בתום השימוש, ניתן להשתמש במכסה הבקבוק (3) לכיסוי הבקבוק, ולהעמידו על המעמד (1).

הערכה הינה לשימוש אישי בלבד ואינה ניתנת להעברה.

