

הוראות שימוש

משעל | דגם Comfort Cough CC20

1. חברו את כבל החשמל למכשיר, ולאחר מכן חברו אותו לשקע.
2. הדליקו את המכשיר בלחיצה על כפתור ההדלקה בצידו האחורי של המכשיר.
3. קביעת הלחצים והמדדים של המכשיר תיעשה אך ורק ע"י רופא/פיזיותרפיסט ריאות.
4. לחצו על כפתור **MENU** לתפריט ההגדרות הראשי. 
5. למעבר בין ההגדרות לחצו על החיצים כלפי **מעלה** או **מטה**.  
6. לבחירת ההגדרה הרצויה לחצו על **ENTER**  וכוונו באמצעות החיצים.  
7. להגדרת ערכים היכנסו ל-**Settings** - הגדרות פעולה.
8. לאחר בחירה של כל ערך רצוי, לחצו **ENTER**  וחזרו למסך הראשי בלחיצה על כפתור **MENU**. 
9. להפעלה/הפסקה של פעולת המכשיר, לחצו על כפתור **START/STOP**. 
10. במצב פעולה ידני יש לכוון שאיפה/נשיפה באמצעות ידית **MENUAL**.
11. חברו את הפילטר למכשיר, ולאחר מכן חברו את הצינור לפילטר.
12. בצידו השני של הצינור חברו את המחבר + המסכה.
13. לפעולה תקינה ולנוחות מרבית, נפחו את כרית האוויר של המסכה באמצעות מזרק 10/20 מ"ל.

הוראות שימוש

משעל | דגם Comfort Cough CC20

תצוגת הגדרות מכשיר	תרגום לתצוגת הגדרות מכשיר
Settings	הגדרות פעולה
Options	הגדרות מכשיר
Date	נתונים
Clear Patient Data	מחיקת נתונים מטופל
Remove SD Card	הוצאת כרטיס זיכרון

תצוגת הגדרות פעולה	תרגום לתצוגת הגדרות פעולה
Preset	מוגדר מראש
Mode	מצב
Pressure display	תצוגת לחץ
Imhale time	זמן שאיפה
Exhale pressure	לחץ נשיפה
Exhale time	זמן נשיפה
Pause time	הפסקה
Oscillation	רטט
Frequency	תדירות הרטט
Amplitude	עוצמת הרטט
Number ofcoughs	מס' שיעולים