

# הוראות שימוש

## כרית סטאר – STAR

1. מניחים את הכרית על הכיסא לפי החיצים המסומנים בתווית שבימין הכרית.
2. מסובבים נגד כיוון השעון את פיית הוונטיל שבפינת הכרית.
3. מלבישים את פיית המשאבה על פיית הוונטיל.
4. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל עם פיית המשאבה ומתחילים לנכח עד שהתאים עומדים זקופים.
5. תופסים את הבסיס הרך של הוונטיל, מושכים החוצה את פיית המשאבה וסוגרים את הוונטיל באמצעות סיבוב בכיוון השעון.
6. מתיישבים על הכרית בישיבה מלאה עד סוף המושב (אין להישען לצדדים).
7. מכניסים את כף היד בין הכרית ובין החלק הבולט של עצמות האגן.
8. פותחים את הוונטיל תוך שחרור איטי של האוויר, ובעזרת האצבעות מעריכים הפרש גובה של כ-2 ס"מ מתחתית הכרית עד היושב עליה.
9. סוגרים את הוונטיל ע"י סיבוב בכיוון השעון.
10. בשלב זה כמות האוויר מותאמת למשתמש.

**אזהרה:** אין לסגור את הוונטיל בחוזקה!

