

הוראות שימוש


משאבת הזנה

SENTINEL / SENTINEL PLUS

1. יש להרכיב את המשאבה על עמוד ייעודי למשאבת הזנה.
2. חברו את המשאבה לשקע חשמל תקני.
3. להפעלת המשאבה לחצו על **ON** – יישמע צפצוף ונורת כמות ההזנה תהבהב.
4. להגדרת קצב ההזנה הנדרש (ע"פ הוראת רופא) לחצו על **UP** או על **DOWN**.
5. יש להרכיב את ערכת ההזנה כמו בתמונה שבעמוד הבא.
6. להגדרת נפח המנה הנדרש לחצו על **ON**, ובאמצעות **UP** או **DOWN** כווננו עד קבלת ערך המנה הרצוי (בחלונית בצד שמאל Infusion Rate).
- הערה: אם הגדרת נפח המנה היא 0 המשאבה תזין עד סיום שקית ההזנה.
7. להפעלת/השהיית המשאבה לחצו לסירוגין על **RUN/STOP**.
8. לשינוי קצב ההזנה השהו את ההזנה בלחיצה על **RUN/STOP**, ולאחר מכן לחצו על **UP** או **DOWN** להגדרת הקצב הנדרש. הקצב שהוגדר יישמר בזיכרון.
9. לאיפוס הזיכרון השהו את ההזנה בלחיצה על **RUN/STOP**, ולאחר מכן לחצו על **CLEAR**.
10. להגדרת כמות ההזנה לחצו לחיצה ממושכת על **CLEAR**. המשאבה תצפצף פעם אחת, תעבור להשהיה, תצפצף פעמיים והצג יאופס.
11. להצגת נפח המנות המצטברות לחצו על **RUN/STOP** לכיבוי המשאבה, לאחר מכן לחצו על **DOSE CHECK**. להפעלת המשאבה שוב לחצו על **RUN/STOP**.
12. לאיפוס נפח המנות המצטברות לחצו על **DOSE CHECK**, ולאחר מכן לחצו לחיצה ממושכת (3 שניות) על מקש **CLEAR**. המשאבה תצפצף פעם אחת, תעבור להשהיה, תצפצף פעמיים והצג יאופס.
13. לאיפוס כל ההגדרות לחצו על **CLEAR** במשך 4 שניות רצופות.
14. לכיוון בהירות הצג לחצו על **UP** ובזמנית על **SET DOSE**.
15. לכיבוי המשאבה לחצו על **OFF**.

אזהרה: הרחיקו את שקיות המילוי מהמשאבה כדי למנוע את שפיכתן.

דגם הזנה SENTINEL PLUS

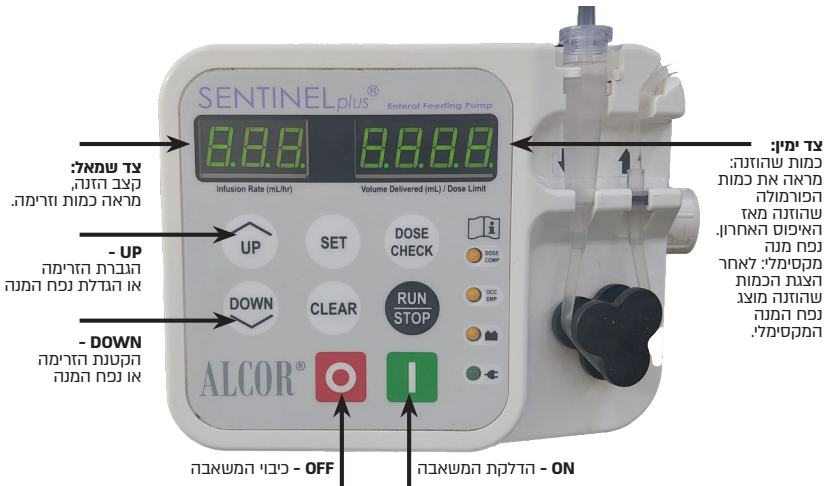

דגם הזנה SENTINEL



DOSE CHECK - מציג את
 הכמות המצטברת שהוזרמה
 מאז האיפוס האחרון

DOSE
 CHECK

SET DOSE - מאפשר את
 חלוקת נפח המנה הכוללת
 למנות קצובות

SET

CLEAR - איפוס נתוני קצר (cLr) כמות הזנה,
 נפח מנה וכמות מצטברת, כאשר לוחצים מייד
 לאחר בדיקת מנה (DOSE CHECK)

CLEAR

RUN/STOP בלחיצה לחלוטין
 מפעיל או משהה את פעולת
 ההזנה

RUN
 STOP

סימונים ואזהרות

1. **OCC/EMP** – נורה זו נדלקת כאשר:
 - שקית ההזנה התרוקנה
 - המשאבה בהשהיה יותר מ-2.5 דקות
 - ההזנה הופסקה בגלל חסימה
 - כוסית הטפטוף לא הותקנה כראוי
2. **DOC COM** – כאשר הכמות המוזנת עוברת את הנפח שהוגדר בזיכרון, יישמעו 4 צפצופים והצג יבהב כל חמש דקות עד טיפול בבעיה.
3. **FLO FAST** – נורה זו נדלקת כאשר:
 - הזרימה מהירה מדי – בדקו את מיקום סט ההזנה והפעילו מחדש את המשאבה.
 - חיישן הטפטוף חסום על ידי כוסית הטפטוף – מקמו מחדש את סט ההזנה.
 - חיישן הטפטוף חסום מפני שכוסית הטפטוף מוצפת – הפכו ומקמו מחדש את כוסית הטפטוף.
4. במכשירים שבהם הסוללה פעילה יש לחבר את המשאבה לחשמל ככל האפשר. הסוללה תיטען במלואה כאשר המשאבה תהיה מחוברת לחשמל כ-10 שעות. בעת שימוש באמצעות הסוללה תידלק הנורה **BAT**.
5. כ-15 דקות לפני שהסוללה מתרוקנת תידלק נורה **LOW BAT**. לאחר מכן יישמע צפצוף והמשאבה תכבה.
6. הרחיקו את המשאבה ממקור חום גבוה והימנעו משימוש במקלטי רדיו ומצרכני חשמל מסיביים בסביבת המשאבה.
7. הימנעו מטלטול המכשיר.

ניקוי וחיטוי המשאבה

1. לפני כל ניקוי נתקו את המשאבה מהחשמל.
2. נגבו במטלית לחה שהוטבלה במי סבון בלבד את משטח המשאבה ואת הגלגלת. את חיישן הטפטפת יש לנגב באמצעות צמר גפן טבול באלכוהול רפואי.