

הוראות שימוש במחולל חמצן

1. מלאו את כוס ההרטבה במים (עדיפות למזוקקים) קצת מעל קו המינימום.
2. סגרו את המכסה היטב ע"י ההברגה.
3. חברו את כוס ההרטבה בהברגה היטב אל המחולל או אל צינורית החיבור.
4. חברו את המשקפיים/המסכה אל פיית הכוס.
5. הקפידו שהצינורית לא תתקפל.
6. חברו את המכשיר לשקע החשמל.
7. הפעילו את המחולל בלחיצה על המתג.
8. כווננו ע"י הבורר/הסקלה למינון הרצוי לפי הוראת הרופא.

בטיחות

- יש להרחיק מאש, מדלקים וממוצרים שומניים.
- יש להרחיק מהקיר ולשמור על חדר מאוורר ונעים.
- **יש לעקוב אחר מדדי החמצן באמצעות מד סטורציה.**

לתשומת ליבכם:

- במכשיר שמייצר עד 5 ליטר - אין לכוון מעל 4.5.
- במכשיר שמייצר עד 10 ליטר - אין לכוון מעל 9.
- אין להשכיב את המכשיר בעת העברתו.
- לפני העברת המכשיר יש לרוקן את המים מהכוס.
- בכל מקרה של תקלה יש לפנות למחלקת השאלת ציוד רפואי (בשעות הפעילות).

